

DESINFEKTION

WipeClean



WipeClean Chlorine Disinfection

Engangsklude klar til brug. Til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler klor.

ALTID KORREKT DOSERING OG INGEN VENTETID

WipeClean Chlorine Disinfection kludene er klar til brug direkte fra pakken og har en holdbarhed efter åbning på 1 måned. De er den optimale løsning til desinfektion af overflader, der tåler klor i f.eks. sundhedssektoren.

Kludene er pakket i forpackninger med lufttætte lukninger og nem lukning. De består af 100% polyester, hvilket har den klare fordel, at kludene afgiver så meget desinfektionsvæske til overfladen som muligt. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

GODT AT VIDE OM WIPECLEAN CHLORINE DISINFEKTION

●●● High-Level

Indholdsstoffer: Sodium Hypochlorite < 1%. Uden parfume og farvestoffer

Holdbarhed: Uåbnet 18 måneder. Efter åbning er kludene holdbare i op til 1 måned

Varenr.	Forpackningsstr.	Anvendelse
5241	Small - 10 wipes 20 x 30 cm	Til desinfektion af 1 m ²
5242	Large - 5 wipes 40 x 30 cm	Til desinfektion af 2,5 m ²

* Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.

Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.



EGENSKABER

Da kludene er både kryds- og z-foldet, kan de nemt tages ud af pakken enkeltvist, foldet og klar til brug.

Produktet må ikke anvendes til hudpleje. Anvend handsker i henhold til EN 374.

BRUGSVEJLEDNING

Tør overfladen, så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid på forpackningen.

Produktet er ikke velegnet til træ, naturgummi, malede og papiroverflader samt visse plastmaterialer. Tjek producentens brugsvejledning omkring desinfektion af udstyret før brug.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hospitaler
- Plejehjem
- Tandlægeklinikker

plum

Chlorine Disinfection

WipeClean Chlorine Disinfection er godkendt i henhold til en række EN-standarder og har dokumenteret effekt mod bl.a. Clostridium difficile og Murine norovirus. Giver minimum 1.000 ppm aktivt klor i hele holdbarhedsperioden.

Bakterier		
Organisme	Kontaktid	Test standard
MRSA	1 min	EN13727
	2 min	EN16615 EN13697
Enterococcus hirae	1 min	EN13727
	2 min	EN16615 EN13697
Escherichia coli	2 min	EN13697
Pseudomonas aeruginosa	1 min	EN13727
	2 min	EN16615 EN13697
Staphylococcus aureus	1 min	EN13727
	2 min	EN16615 EN13697

Virus		
Organisme	Kontaktid	Test standard
HEP B HEP C HIV Influenza A H1N1 Murine norovirus Adenovirus Poliovirus	1 min	EN14476

Sporer		
Organisme	Kontaktid	Test standard
Bacillus subtilis Bacillus cereus Clostridium sporogenes	2 min	EN13704
Clostridium difficile	2 min	EN13704 EN16615

Tuberkulose / Mykobakterier		
Organisme	Kontaktid	Test standard
Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	1 min	EN14348

Svampe / Gær		
Organisme	Kontaktid	Test standard
Aspergillus brasiliensis	15 min	EN13697
	2 min	EN13624
Candida albicans	2 min	EN16615 EN13697 EN13624



Produktet er CE-mærket.
Sikkerhedsdatablad fremsendes efter ønske.